

Het vervangen van de CA4 amalgaam-opvangtank



ATTENTIE

Risico op contaminatie bij herhaald gebruik van de amalgaam-opvangtank door lekkage in opvangtank.

› Gebruik de opvangtank niet meer dan één keer (wegwerpartikel).



Draag persoonlijke beschermingsmiddelen om infecties te vermijden



Wij raden de vervanging van de amalgaam-opvangtank alleen 's morgens voor het begin van het werk uit te voeren. Daardoor wordt vermeden, dat er gedurende het vervangen vloeistof uit de trommel druppelt


Instructies

- › Apparaat spanningsvrij schakelen.
(Als de Amalgaamafscheider op de schakelkast van de afzuigmotor is aangesloten, moet u de stekker van de afzuiginstallatie uit het stopcontact halen.)
- › Draai de tankhendel naar boven en verwijder de amalgaam-opvangtank uit het apparaat.
- › Giet desinfectiemiddel voor zuiginstallaties (Orotol plus, 30 ml) in de gevulde amalgaam-opvangtank.
- › Sluit de gevulde amalgaam-opvangtank af met het deksel. Let op de markeringen op het deksel en de opvangtank.
- › Stop de afgesloten amalgaam-opvangtank in de originele verpakking en sluit deze.
- › Plaats de nieuwe amalgaam-opvangtank in het apparaat en vergrendel deze.



Gebruik alleen originele amalgaam-opvangtanks.

- › Schakel de spanning in. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

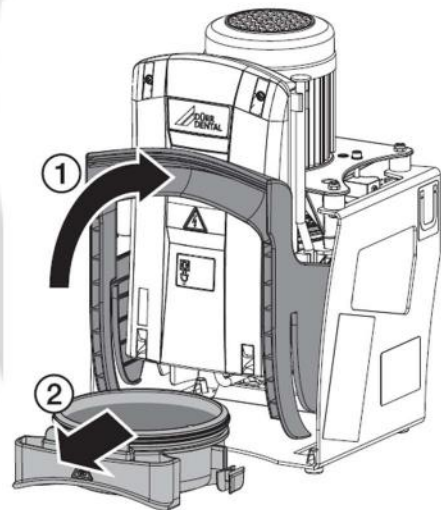


Verwijdering als afval van de amalgaam-opvangtank



De inhoud van de amalgaam-opvangtank bevat zware metalen en mag niet bij het gewone afval of in het milieu terecht komen!

Op laten halen door een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf van de praktijk.

Meldingen van de CA4 Amalgaamafscheider

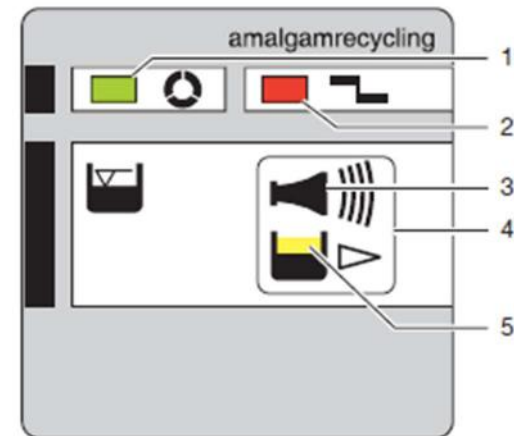




- 1 GROEN lampje
- 2 ROOD lampje
- 3 Geluidssignaal/melodie
- 4 Reset/servicetoets
- 5 GEEL lampje

De amalgaamafscheider is klaar voor gebruik

Groen lampje brandt 

Amalgaam-opvangtank voor 95% gevuld

Groen lampje brandt 
 Geel lampje brandt 
 Signaalmelodie klinkt 




Bij een vloeistofpeil van 95% kan het geluidssignaal met de resettoets worden uitgeschakeld. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Het gele lampje brandt om u attent te maken op de noodzakelijke vervanging van de opvangtank. Na het opnieuw inschakelen van de hoofdschakelaar wordt het peil opnieuw weergegeven.



Wij raden aan de amalgaam-opvangtank bij een peil van 95% te vervangen.

Amalgaam-opvangtank voor 100% gevuld



Geel lampje brandt 
 Rood lampje knippert 
 Signaalmelodie klinkt 

Bij een vloeistofpeil van 100% kan het geluidssignaal niet meer worden uitgeschakeld met de resettoets.

De opvangtank moet direct worden vervangen. (zie "het vervangen van de amalgaam-opvangtank" op pagina 1 voor meer uitleg.)

Pas na het vervangen van de amalgaam-opvangtank is de afscheider weer bedrijfsklaar

Amalgaam-opvangtank niet geplaatst

Rood lampje knippert 
 Signaalmelodie klinkt 

Door kort de resettoets in te drukken kan het geluidssignaal worden uitgeschakeld.


- Apparaat uitschakelen.
- Plaats de opvangtank.
- Schakel het apparaat in.
- Het groene lampje 'bedrijfsklaar' brandt




Doet zich deze storingsmelding ook bij gebruikte opvangtank voor, dan is er sprake van een technisch defect – technicus hiervan op de hoogte brengen.

Motorstoring


Rood lampje en
groen lampje
knipperen afwisselend
Signaalmelodie klinkt

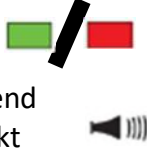

-  Treedt tijdens het starten van de amalgaamafscheider op.


Door kort de resettoets in te drukken kan het geluidssignaal worden uitgeschakeld.


Wordt de resettoets langer dan 2 sec. ingedrukt, dan kan het apparaat opnieuw worden gestart.

-  Treedt de fout op dezelfde dag nogmaals op, dan is de amalgaamafscheider daarna niet meer klaar voor gebruik - technicus hiervan op de hoogte brengen.


Rembewaking

Rood lampje en
groen lampje
knipperen afwisselend
Signaalmelodie klinkt

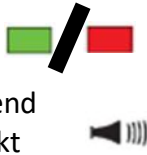



-  Treedt bij het afremmen van de amalgaamafscheider op.


Door kort de resettoets in te drukken kan het geluidssignaal worden uitgeschakeld. De amalgaamafscheider blijft verder klaar voor gebruik.

-  Als de fout meerdere dagen op rij optreedt, moet de werking van de rem worden gecontroleerd door een technicus.

Noodstartsensoren in overvulstand

Groen lampje brandt 
Geel lampje knippert 

De gele led dooft wanneer de noodstartsensoren weer vrij is.

-  Als de gele weergave langere tijd knippert, controleer dan of er zich in de opvangtank schuim bevindt.