

Handleiding afzuigsysteem

Desinfectie en reiniging

CDS raadt aan
– voor de desinfectie en reiniging: Orotol plus
– voor de reiniging: MD 555 cleaner
Alleen deze producten worden door Dürr Dental getest.

Bij het gebruik van profylaxepoeders raadt CDS de in water oplosbare Lunos Profylaxepoeders aan om de Dürr zuigsystemen te beschermen.

Na iedere behandeling

› Een glas koud water met de grote en kleine zuigslang leegzuigen. Ook wanneer tijdens de behandeling alleen de kleine zuigslang gebruikt werd.



Bij het afzuigen met de grote zuigslang wordt een grote hoeveelheid lucht aangezogen; het reinigende effect wordt daardoor aanzienlijk verhoogd.

Dagelijks aan het einde van de behandeling



Bij hogere belasting voor de middagpauze en 's avonds

Voor de desinfectie/reiniging hebt u het volgende nodig:

- Orotol Plus (artikel CDS110P61, te bestellen bij uw kleingoed-leverancier)
- Een OroCup (artikel 0780-350-00)
 - › Zuig als voorreiniging 2 liter water met de Orocup af.
 - › Zuig de Orotol-oplossing met de Orocup af.



ATTENTIE

Storing in het apparaat of beschadiging door onjuist materiaal

De aanspraak op garantie kan daardoor vervallen.

- › Gebruik geen schuimende middelen zoals huishoudelijke reinigingsmiddelen of instrumentendesinfectiemiddelen.
- › Gebruik geen schuurmiddel.
- › Gebruik geen middelen met chloor.
- › Gebruik geen oplosmiddelen zoals aceton.

Een tot twee keer per week voor de middagpauze



Bij hogere belasting (bijv. bij kalkhoudend water of frequent gebruik van profylaxepoeder) dagelijks voor de middagpauze

Voor de reiniging hebt u het volgende nodig:

- MD555 Afzuigreiniger (artikel CCS555C61 te bestellen bij uw kleingoed-leverancier)
- Een OroCup (artikel 0780-350-00)

› Zuig als voorreiniging 2 liter water met de Orocup af.

› Zuig de MD555-oplossing met de Orocup af.

› Spoel na 45 minuten inwerktijd met ca. 2 liter water na.

Beschermingszeef reinigen



WAARSCHUWING


Infectie door gecontamineerd apparaat

- › Voor werkzaamheden aan het apparaat de afzuiging reinigen en ontsmetten.
- › Draag persoonlijke beschermingsmiddelen bij werkzaamheden (bijv. waterdichte veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, mondbescherming).



De beschermingszeef dient eens in de week schoongemaakt te worden.

- › Beschermzeef met een halve omwenteling tegen de wijzers van de klok in losmaken.
- › Beschermingszeef aan de steun van de separatietank eruit trekken.

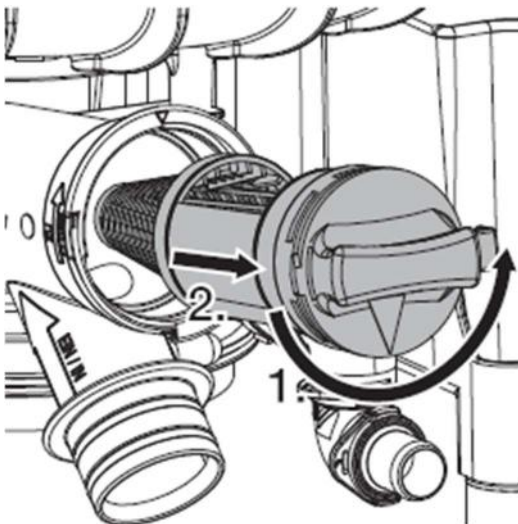

- › Beschermingszeef met een tandenborstel reinigen.
- › Beschermzeef met de opening naar boven terug in de steun van de separatiebehuizing steken.
- › De beschermzeef volgens de wijzers van de klok tot aan de aanslag indraaien.