

Hygiëneprotocol XO units

1. Ochtend

- Zorg dat de compressor aanstaat.
- Zet de behandelstoel aan.
 - Indien de laatste werkdag hoofdstuk 3. *Einde werkdag 'Waterclean'* is doorlopen:
 - Op display staat "Waterclean Active"; 6 min wachten- tot melding 'flush ok'.
 - Slangen kunnen van de spoelschaal afgehaald en teruggelegd worden op de brug.
 - Slangetje spoelschaal loskoppelen en de schaal van de unit afhalen.
- De behandelstoel is klaar voor gebruik.


2. Einde werkdag 'suction clean'

- Witte zeefjes van de afzuiging vervangen voor schone (inclusief houder).
- Vieze zeefjes met houder in sterilisatie ruimte schoonmaken en in water met een beetje chloor leggen.
- Kopstuk afzuigers eraf halen, afzuigslangen aansluiten op mondstukken (zie foto) en 2x op de zwarte knop daaronder drukken.
- Na doorspoelen (melding op display 'OK') de slangen terugplaatsen in de afzuighouders.



3. Einde werkdag 'Waterclean'

- Spoelschaal plaatsen en aansluiten op de witte koppeling aan de zijkant van de unit (achter het luikje).
- Meerfunctiespuit aansluiten op zwarte koppeling spoelschaal.
- Overige slangen aansluiten op spoelschaal.
- Knop X op het voetpedaal minimaal 5 seconden inhouden (tot een zachte klik hoorbaar is).
- Er verschijnt een melding: 'waterclean active' o.d. op het scherm van de brug.
- Na melding 'OK / Switch unit off' unit uitzetten.

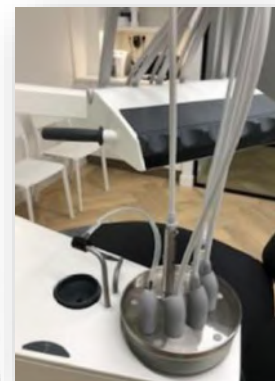

Onderhoud

Dagelijks

- Na elke controle en extractie: afzuigslangen met water doorspoelen
- Bekleding:

De bekleding kan met diverse middelen schoongemaakt worden (maar niet met alcohol houdende middelen!):

- Dürr FD 366 op microvezeldoekje aanbrengen (ook verkrijgbaar als vochtige doekjes die direct te gebruiken zijn). Dit middel is daarnaast ook geschikt voor reiniging en desinfectie van de overige oppervlakken.
- Dürr FD 360; dit middel reinigt niet alleen al het (kunst)leder, maar het verzorgt daarnaast ook het materiaal voor een langere levensduur. Spray ook deze op een microvezeldoekje en breng dit voorzichtig aan op de bekleding.
- CDS-001 is het reinigingsmiddel van onze eigen bekleder. Met de lage prijs is deze financieel ook zeer aantrekkelijk en doet niet onder voor vele andere duurdere middelen. Ook deze moet opgebracht worden d.m.v. een microvezeldoekje. Deze is ook beschikbaar als onderhoudsmiddel. Voor een mooiere glans en langere levensduur.

Minimaal 2x per week

Unit doorspoelen met MD555

50ml MD555 aanvullen met water tot 1 liter, slangen los koppelen en aansluiten op Orocup, wanneer er nog een klein laagje vloeistof over is dan de slangen terug hangen, het restant in het gat van de spitoonbak doen (dopje en zeefje verwijderen). Alles minimaal 30 minuten laten inwerken en naspelen met water. Tot slot spitoonkraan laten lopen en zwarte/blauwe knop (zie 2. Middagpauze) 3 sec ingedrukt houden.



1x per week

- Dopjes voetpedaal afnemen met alcohol (voorkomt wegschuiven)
- Zachte wielen XO stoeltjes afstoffen

1x per maand

- Vervangen witte zeefjes (dunne rand naar boven)